

Provtagningsanvisning för benbank, sterilkontroll

Avgränsning/Bakgrund

Sterilkontroll av benvävnad för donation genom odling i buljong av benbiopsi. Analysen ska EJ användas för kliniska indikationer.

Provtagning

Tag två små prover (< 1 cm diameter) av benmaterialet och placera vardera i en steriltförpackad NB-buljongburk "AEROB" respektive FAB-buljongburk "ANAEROB"

Märk burkarna med remissetikett.



Figur 1. Buljongburk (märkt AEROB eller ANAEROB), beställs via telefon från Klinisk mikrobiologi, Kalmar, telefonnummer: 010-35 814 41.

Remissen

I Cosmic: Välj fliken *Mikrobiologi* → *Grupper/paket* → *Vårdhygien* → *Donerad benvävnad (benbank) - Sterilkontroll*. Ange donationsnumret i anamnesen. Meddela laboratoriet vid eventuella problem vid provtagningen.

I avvaktan på transport

Förvaras i rumstemperatur.

Svar och bedömning

Slutsvar efter 6 dygn. Telefonsvar lämnas ej.

Faktorer som påverkar svarets kvalitet

- Ej steril provtagning
- Inkubering i fel miljö innan prov anländer till Klinisk mikrobiologi